

VITALmaxx

Schnarchstopper

06164



DE Gebrauchsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für unseren Schnarchstopper mit Vibration entschieden hast.

Er ist klein, angenehm zu tragen und stoppt nervige Schnarchgeräusche – so können dein Partner und du ungestört durchschlafen und am nächsten Morgen ausgeruht aufwachen.

Solltest du Fragen zum Produkt sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, wende dich an den Kundenservice über unsere Website:

www.ds-group.de/kundenservice

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lies vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

SYMBOLE



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Gleichstrom



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

GEFAHR hohes Risiko, hat schwere Verletzung oder Tod zur Folge

WARNUNG mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

HINWEIS kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Produkt dient zum Verhindern von Schnarchgeräuschen durch Vibration während des Schlafens.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Das Produkt nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Es besteht Verletzungsrisiko durch falsche Benutzung!
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Das Produkt ist bei nicht vorhandener Aufsicht sowie vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen. Wenn das Produkt oder USB-Kabel beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



GEFAHR – Stromschlaggefahr

- Das Produkt nur in geschlossenen Räumen aufladen und lagern.
- Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, aufladen oder lagern.
- Das Produkt und das USB-Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte das Produkt ins Wasser fallen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. **Erst danach** das Produkt aus dem Wasser ziehen!
- Das Produkt und das USB-Kabel niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es eine Fehlfunktion hatte, heruntergefallen oder ins Wasser gefallen ist. Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.



WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickengefahr!
- Sicherstellen, dass das USB-Kabel stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Im Interesse der eigenen Sicherheit das Produkt und das USB-Kabel vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Das Produkt nur benutzen, wenn es funktionsfähig ist.
- Darauf achten, dass das USB-Kabel keine Stolpergefahr darstellt.



WARNUNG – Gefahr durch Akkus

- Das Produkt mit eingebautem Akku darf nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder hohen Temperaturen über +40 °C ausgesetzt werden. Der Akku könnte sich entzünden oder explodieren. Das Produkt nicht in einem Fahrzeug aufbewahren, wo sie extremen Temperaturen ausgesetzt sein könnte.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn Flüssigkeit eingedrungen ist. Der Akku im Produkt könnte sich entzünden oder explodieren.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn der Akku ausgelaufen ist.



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Produkt nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien etc.) aufladen.
- Das Produkt während des Betriebes und Ladens nicht abdecken, um eine Überhitzung zu vermeiden.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Produkt vor Feuer, Wärmequellen, Minustemperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit und Stößen schützen.
- Darauf achten, dass das USB-Kabel nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Das USB-Kabel vor dem Anschließen eines USB-Netzadapters vollständig auseinanderwickeln.
- Wenn der USB-Netzadapter aus der Steckdose gezogen wird, immer am USB-Netzadapter und nie am USB-Kabel ziehen.
- Das Produkt nicht am USB-Kabel ziehen oder tragen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Produktes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Keine schweren Gegenstände auf das Produkt oder das USB-Kabel stellen.

LIEFERUMFANG

- 1 x Schnarchstopper mit integriertem Akku
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Aufbewahrungsbeutel
- 1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Produkt abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**



Für das Laden am Stromnetz wird zusätzlich ein geeigneter USB-Netzadapter (siehe Kapitel „Technische Daten“) benötigt.

AKKU AUFLADEN

Beachten!

- Den USB-Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die mit seinen technischen Daten übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Den USB-Netzadapter aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Das USB-Kabel über die Anschlussbuchse auf der Rückseite mit dem Produkt verbinden. Die Kontrollleuchte auf der Oberseite blinkt rot. Sobald das Produkt fertig geladen ist leuchtet die Kontrollleuchte konstant rot.

BENUTZUNG

- Auf der Vorderseite des Produktes befindet sich der Ein- / Ausschalter. Diesen für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, um das Produkt einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet alle 3 Sekunden blau auf.



Wenn sich der Akkustand verringert, blinkt die Kontrollleuchte häufiger in blau auf.

- Vor dem Schlafen die Schlaufen am Produkt über die Ohren ziehen und darauf achten, dass das Produkt mit der Unterseite am Kinn sitzt.



Sollten die Schlaufen nicht ideal sitzen, die Silikonstopper verschieben und damit die Länge der Schlaufen anpassen.

- Wenn das Produkt innerhalb von 30 Sekunden dreimal Schnarchgeräusche wahrnimmt, gibt es Vibrationen ab. Je nach Lautstärke der Schnarchgeräusche wird die Vibration verstärkt. Das Drücken des Ein- / Ausschalters für 3 Sekunden unterbricht die Vibration.
- Nach dem Aufstehen zum Ausschalten erneut den Ein- / Ausschalter für ca. 3 Sekunden gedrückt halten und die Schlaufen von den Ohren nehmen. Die Kontrollleuchte blinkt 10x blau auf.
- Das Produkt schaltet sich nach 8 Stunden automatisch aus.

REINIGUNG

- Zum Reinigen des Produktes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Sie könnten die Oberfläche beschädigen.
- Das Produkt regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
- Das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen, sauberen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren lagern.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	06164
Modellnummer:	ANR01
Akku:	3,7V DC (1 x Li-Ion-Akku, 90 mAh)
Stromversorgung:	5 V, 1 A USB-Netzadapter
Akkuladedauer:	ca. 1 – 2 Stunden
Nutzungsdauer:	bis 48 Stunden (bei vollem Akku)
ID Gebrauchsanleitung:	Z 06164 M DS V1 0522 mh



ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle der Gemeinde/ des Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand abgeben. Bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole abkleben, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Kundenservice / Importeur

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Deutschland
Tel.: +49 38851 314650*

*Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif deines Anbieters.

Alle Rechte vorbehalten.